





Oxivir Excel CE Mini Guide

Verfügbar im 100 Stück Softpack



Zu Desinfizieren von:

Stark benutzte Oberflächen

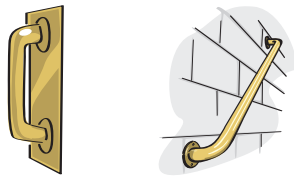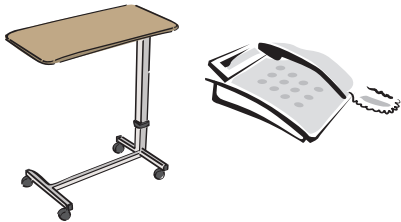

Nicht auf Marmor verwenden




Gebrauchsfertig für
schnelleres Arbeiten




Oxivir Excel ist als MDD
- CE Class IIa zertifiziert
(entsprechend der Medical
Device Directive)

Anwendung...

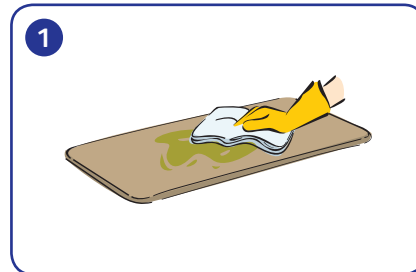


Grobe Verunreinigungen
entfernen.

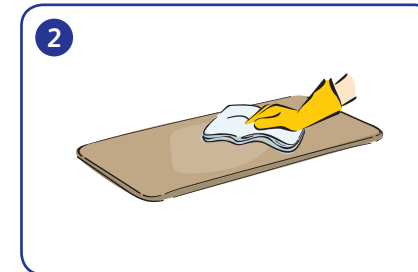

Oberfläche reinigen und
desinfizieren.



Mind. 30 Sekunden Einwirkzeit
einhalten, um die Entfernung
von Viren nach EN14476 zu
gewährleisten.

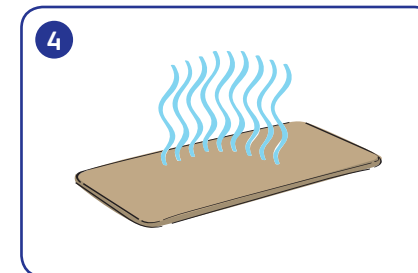

Trocknen lassen.

